

i.v.notice

DIAGNOSTICS


M&H CARE | MEDICAL AND HOSPITAL CARE

NNorstray & Nuart brands




APÓSITOS DE SEGURIDAD & CINTAS MÉDICAS

Muestrario de Producto

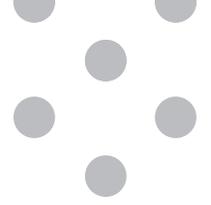

Apósitos de Seguridad

Explora el potencial de los **apósitos de seguridad** i.v. notice, diseñados para contribuir con la estabilización de los catéteres intravenosos en procedimientos médicos. Los apósitos i.v. notice están pensados para ayudar a proteger y mantener el dispositivo en su lugar, reduciendo potencialmente el movimiento y disminuyendo las posibilidades de desprendimiento. Con i.v. notice podrás descubrir una mejorada experiencia en el cuidado del paciente, contribuyendo a tener procedimientos más seguros y eficientes.

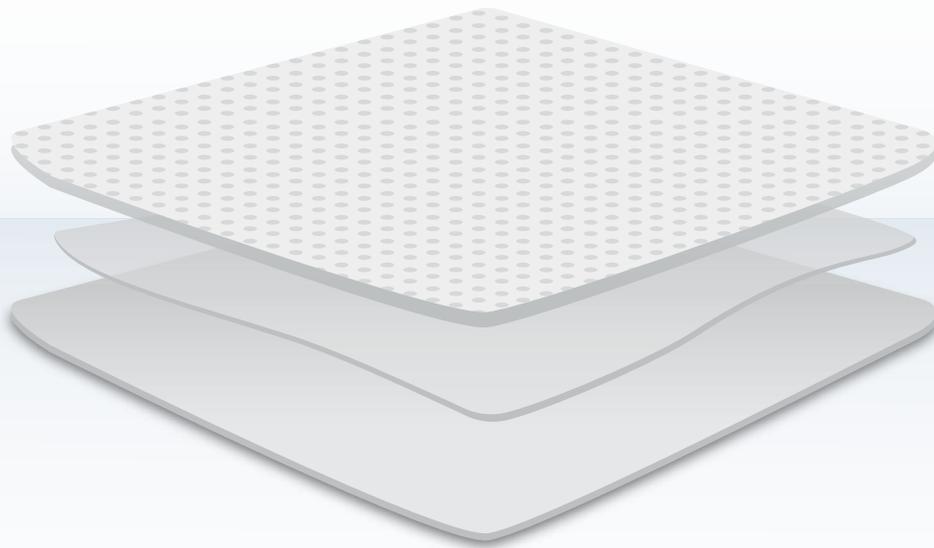

Nuestras Referencias



i.v. premium
Kids



i.v. premium



i.v. premium



film premium



i.v. premium
pad

i.v.notice

A  Norstray & Nuart brand

Apósitos

i.v. premium | Kids

Los apósitos **i.v. premium kids** están especialmente diseñados para proporcionar un cuidado excepcional a pacientes pediátricos, combinando una fijación de catéter de larga duración y un proceso de aplicación y remoción que es suave con la piel sensible de los niños. Los apósitos i.v. premium kids están disponibles en tamaños especiales, ideados para responder a las necesidades específicas de la población infantil en entornos clínicos.



Información del producto

Código Interno	Descripción	Unds x Caja	Unds x Máster
IVN1001	Apósito i.v. premium Kids, 4.4cm x 4.4cm	50	1.000


Beneficios

- Pensados para adaptarse a los pacientes más jóvenes.
- Especialmente suaves y amigables con la piel de los niños.
- Ofrecen mayor seguridad y durabilidad en comparación con los apósitos transparente estándar.

i.v. premium Kids


Tiras de seguridad

Contiene adhesivos de gran sujeción para mayor agarre sobre los catéteres.

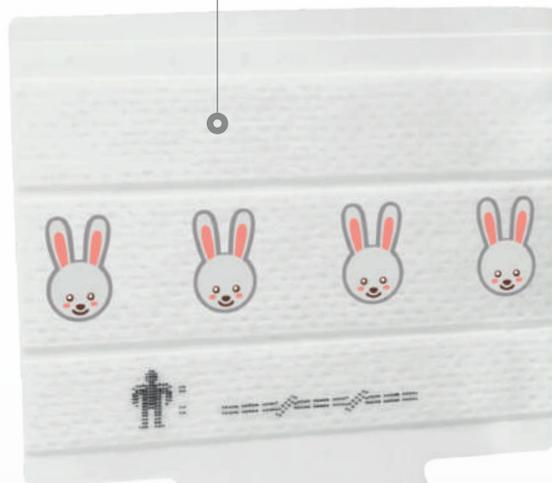

Refuerzos laterales

Los cubrimientos laterales permitirán que el ajuste de la piel del paciente sea total sin irritar o lastimar la superficie cutánea. De gran absorción para evitar el filtrado de líquidos.

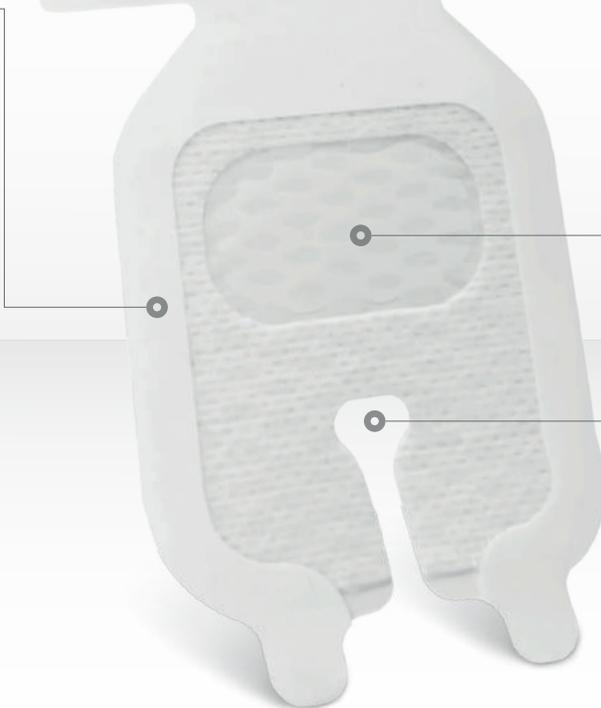

Ventana de visión

Protegida en film transparente que permite revisar el estado del catéter y la piel del paciente durante el tiempo que este se encuentre canalizado.

Silueta de catéter

Forma perfecta que se ajusta al catéter intravenoso, proporcionando mayor seguridad y tranquilidad al paciente y al equipo asistencial.

Los apósitos **i.v. notice** están compuestos por capas delgadas y resistentes de película transparente hipo-alérgica, libre de látex, a prueba de agua, con bordes estabilizadores y cintas de fijación para extra seguridad.

Apósitos

i.v. premium

Los apósitos **i.v. premium** son esenciales para asegurar y preservar la integridad de los catéteres intravenosos, además de minimizar movimientos, prevenir el desprendimiento del catéter y ayudar a reducir el riesgo de infecciones durante los procesos de canalización.

Los apósitos de seguridad cumplen con las definiciones de calidad en cuanto a productos de sujeción, apoyando los protocolos de los profesionales de la salud durante sus procedimientos.



Información del producto

Código Interno	Descripción	Unds x Caja	Unds x Máster
IVN1002	Apósito i.v. premium, 6cm x 7cm	50	1.000

Beneficios

- Ofrece una sujeción segura.
- Adhesivos que proporcionan una fuerte adherencia y al mismo tiempo, son amigables con la piel del paciente.
- Diseñados para mantener la sujeción, adaptándose al movimiento del paciente y gestionando la humedad del ambiente.
- Tienen un borde reforzado, una abertura con la forma del catéter y tiras desujeción que elevan la calidad y experiencia durante el uso del dispositivo.

Tiras de seguridad

Contiene adhesivos de gran sujeción para mayor agarre sobre los catéteres.

Refuerzos laterales


Los cubrimientos laterales permitirán que el ajuste de la piel del paciente sea total sin irritar o lastimar la superficie cutánea. De gran absorción para evitar el filtrado de líquidos.

Ventana de visión

Protegida en film transparente que permite revisar el estado del catéter y la piel del paciente durante el tiempo que este se encuentre canalizado.

Silueta de catéter

Forma perfecta que se ajusta al catéter intravenoso, proporcionando mayor seguridad y tranquilidad al paciente y al equipo asistencial.

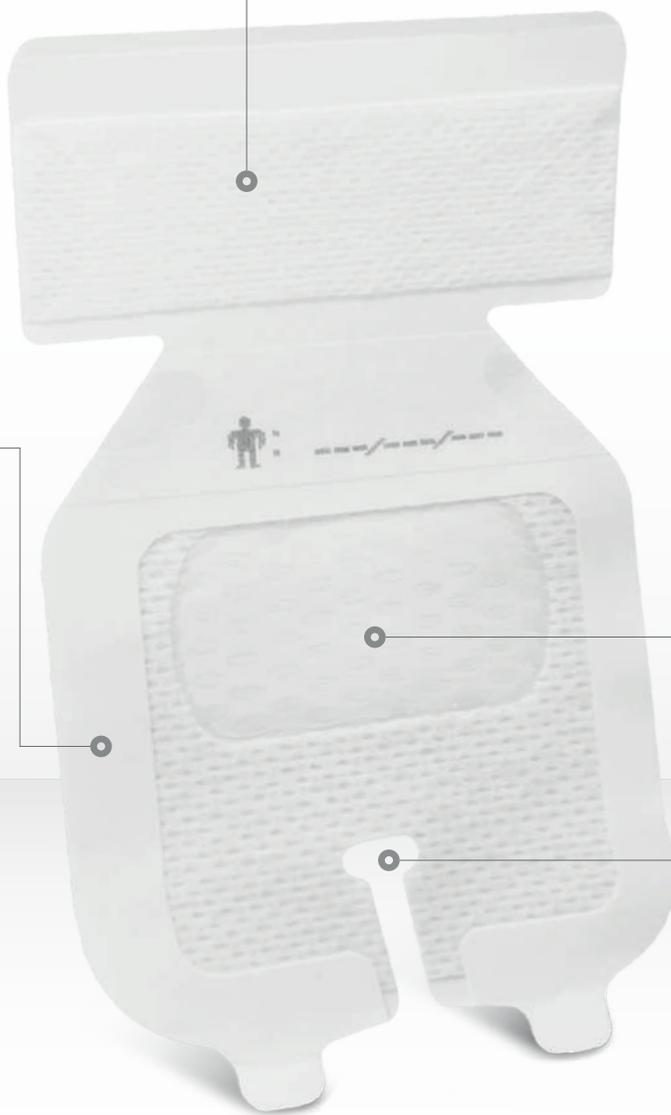

Los apósitos **i.v. notice** están compuestos por capas delgadas y resistentes de película transparente hipo-alérgica, libre de látex, a prueba de agua, con bordes estabilizadores y cintas de fijación para extra seguridad.

Apósitos

i.v. premium

El apósito **i.v. premium, 8cm x 10cm** tiene un innovador diseño que incluye tiras de seguridad para maximizar la sensación de adherencia y garantizar la protección del catéter en la piel del paciente.

Los apósitos i.v. premium facilitan el manejo de los catéteres intravenosos ya que, gracias a su material, reducen la necesidad de ser reemplazados y cambiados tan constantemente. Adicionalmente, la ventana film transparente permite la monitorización de la herida y el estado de la inserción, para promover el cuidado del paciente durante los procedimientos a realizar.



Información del producto

Código Interno	Descripción	Unds x Caja	Unds x Máster
IVN1003	Apósito i.v. premium, 8cm x 10cm	50	1.000

Beneficios

- Gran adherencia y seguridad en el agarre.
- Borde reforzado y forma del catéter que facilitan la precisión en el momento del pegado.
- Reforzado con material que permite el movimiento y tiras de seguridad para garantizar la sujeción en la piel del paciente.

Tiras de seguridad

Contiene adhesivos de gran sujeción para mayor agarre sobre los catéteres.

Silueta de catéter


Forma perfecta que se ajusta al catéter intravenoso, proporcionando mayor seguridad y tranquilidad al paciente y al equipo asistencial.

Ventana de visión

Protegida en film transparente que permite revisar el estado del catéter y la piel del paciente durante el tiempo que este se encuentre canalizado.

Refuerzos laterales

Los cubrimientos laterales permitirán que el ajuste de la piel del paciente sea total sin irritar o lastimar la superficie cutánea. De gran absorción para evitar el filtrado de líquidos.

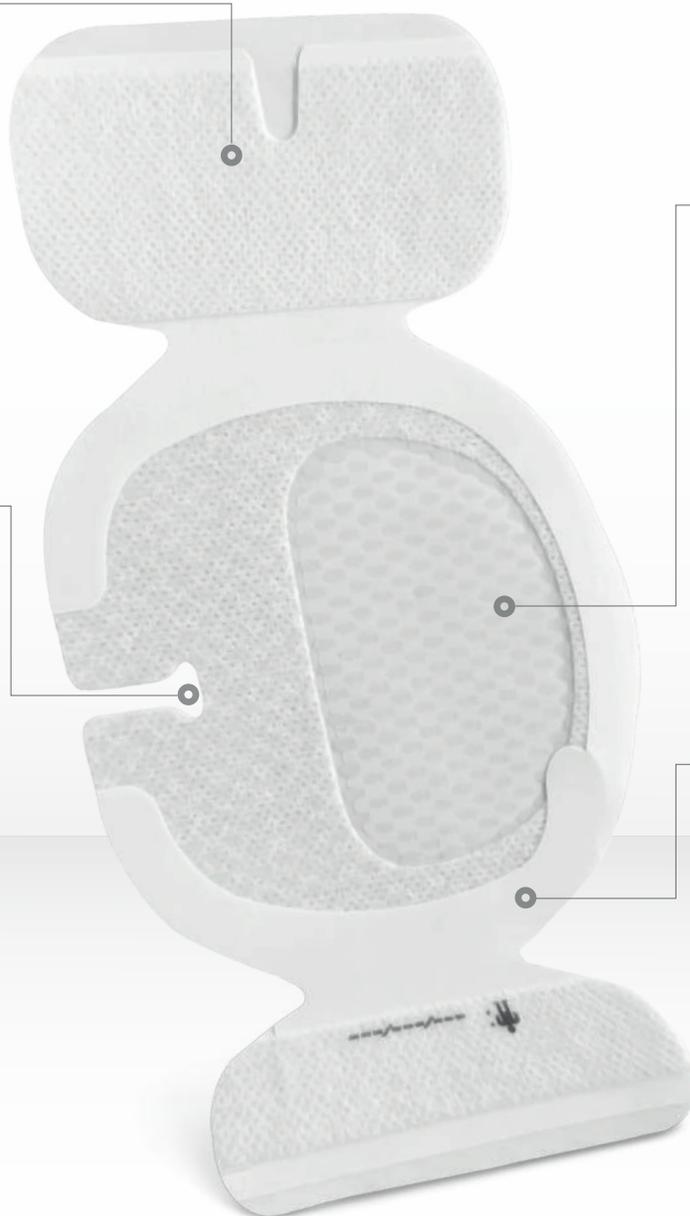

Los apósitos **i.v. notice** están compuestos por capas delgadas y resistentes de película transparente hipo-alérgica, libre de látex, a prueba de agua, con bordes estabilizadores y cintas de fijación para extra seguridad.

Apósitos film premium

Los apósitos **film premium** de i.v. notice, están compuestos por una fina capa de película transparente con un adhesivo hipoalergénico y libre de látex; que se adhiere suavemente y de manera segura a la piel. Son transpirables, estériles, transparentes e impermeables, y actúan como barrera contra contaminantes externos. Los apósitos film premium están diseñados en variedad de tamaños e incluyen cintas de sujeción, para ofrecer soluciones en situaciones que involucren heridas difíciles y catéteres intravenosos.



Información del producto

Código Interno	Descripción	Unds x Caja	Unds x Máster
IVN1004	Apósito film premium, 10cm x 12cm	100	2.000
IVN1005	Apósito film premium, 6cm x 7cm	100	2.000
IVN1006	Apósito film premium, 4cm x 6cm	100	2.000

Beneficios

- Versátiles: apto para apoyar en diversas situaciones clínicas.
- Disponibles en una amplia variedad de tamaños para satisfacer diferentes necesidades.
- Los apósitos film premium, tienen un marco que permite que se adapten a aplicaciones especiales en donde se requiera un monitoreo constante.

film premium

Tira de información

Tira desplegable para marcar el apósito con fecha de colocación.



Ventana de visión

Protegida en film transparente que permite revisar el estado del catéter y la piel del paciente durante el tiempo que este se encuentre canalizado.

Refuerzos laterales

Los cubrimientos laterales permitirán que el ajuste de la piel del paciente sea total sin irritar o lastimar la superficie cutánea. De gran absorción para evitar el filtrado de líquidos.

Los apósitos **i.v. notice** están compuestos por capas delgadas y resistentes de película transparente hipo-alérgica, libre de látex, a prueba de agua, con bordes estabilizadores y cintas de fijación para extra seguridad.

Apósitos

i.v. premium pad

El apósito **i.v. premium pad** de i.v. notice se adapta a varios niveles de exudado, propiciando entornos con humedad controlada e ideal para heridas que presenten exudado leve, moderado o abundante. Su diseño permite una eficaz absorción de la humedad, lo cual reduce el riesgo de lesiones o adhesión a la herida.




Información del producto

Código Interno	Descripción	Unds x Caja	Unds x Máster
IVN1007	Apósito i.v.premium pad, 6cm x 7cm	50	1.000
IVN1008	Apósito i.v.premium pad, 6cm x 10cm	50	1.000
IVN1009	Apósito i.v.premium pad, 9cm x 10cm	50	1.000

Beneficios


- Fácil de aplicar y manejar.
- Mantiene condiciones óptimas para la cicatrización.
- El diseño multicapa facilita la gestión de la humedad.
- Adecuado para manejar heridas con distintos grados de exudado.

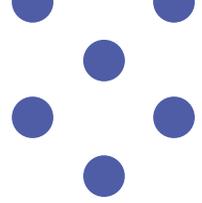

i.v. premium pad

Tira de información

Tira desplegable para marcar el apósito con fecha de colocación.

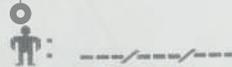

Ventana de visión


Protegida en film transparente que permite revisar el estado del catéter y la piel del paciente durante el tiempo que este se encuentre canalizado.

Refuerzos laterales

Los cubrimientos laterales permitirán que el ajuste de la piel del paciente sea total sin irritar o lastimar la superficie cutánea. De gran absorción para evitar el filtrado de líquidos.

Pad

Almohadilla absorbente diseñada para protección de heridas supurantes.

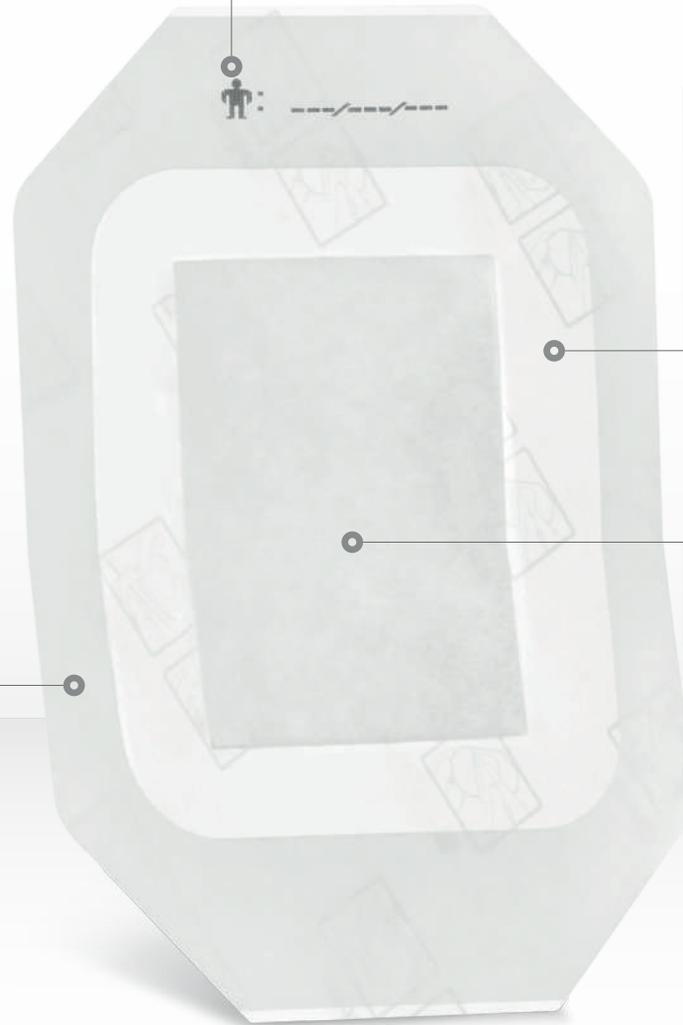

Los apósitos **i.v. notice** están compuestos por capas delgadas y resistentes de película transparente hipo-alérgica, libre de látex, a prueba de agua, con bordes estabilizadores y cintas de fijación para extra seguridad.

iv.notice

Cuidado de la piel

Simplifica el cuidado de la piel del paciente incorporando el **Removedor de Adhesivo** y el **Protector Cutáneo** i.v. notice en cada procedimiento. Protege la piel de posibles lesiones cutáneas asociadas con los adhesivos médicos.



Removedor
Adhesivo 25mL

Removedor
Adhesivo 50mL

Protector
Cutáneo

Removedor de Adhesivo en Spray

El **Removedor de Adhesivo** i.v. notice trabaja como un aliado durante los procedimientos de cambio y remoción de los apósitos y cintas médicas. Con su fórmula sin alcohol y amigable con la piel sensible, eliminará todo rastro de adhesivo protegiendo la piel sin dejar sensación pegajosa.



Información del producto

Código Interno	Descripción	Unds x Caja	Unds x Máster
IVN1010	Spray Removedor Adhesivo, 25mL	1	100
IVN1011	Spray Removedor Adhesivo, 50mL	1	100

Beneficios

- Aplicación sin ardor.
- No tiene sensación pegajosa.
- Es hipoalergénico y amigable con todo tipo de piel.

Protector Cutáneo

El **Protector Cutáneo** i.v. notice trabaja como una barrera primaria que protege la piel de los adhesivos médicos. Simplifica el cuidado del paciente mediante su fórmula amigable con todo tipo de piel, de rápido secado y libre de alcohol con alta durabilidad.



Información del producto

Código Interno	Descripción	Unds x Caja	Unds x Máster
IVN1012	Protector Cutáneo	30	300

Beneficios

- De rápido secado y sin olor o color.
- Barrera primaria de protección contra fluidos y humedad.
- Fórmula suave y de rápido secado, sin sensación pegajosa.

Guía paso a paso


Colocación de un Apósito

Colocación


Para dar inicio a la colocación de un apósito es necesario valorar la integridad de la piel, luego se procede a realizar la asepsia del lugar donde se va a realizar la punción y la colocación del yelco.




1 Aplique el protector cutáneo i.v. notice uniformemente sobre la piel limpia y seca. Espere unos segundos antes de proceder con el pegado del apósito.

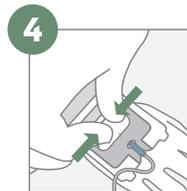


4 Ajuste el apósito con una ligera presión sobre la piel sana alrededor de la herida (no se debe aplicar calor).

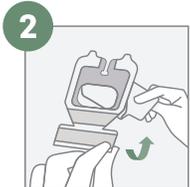


2 Desprenda el recubrimiento del apósito que contiene la superficie adhesiva. No se debe tocar la parte adhesiva ni el campo de visión transparente.

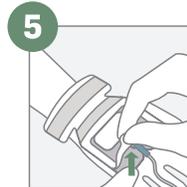

5 Retire suavemente la tira de recubrimiento sobrante del apósito mientras ejerce presión sobre él.

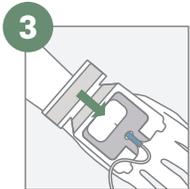

3 Coloque la parte transparente del apósito de forma que quede en el centro de la herida o sitio de inserción, sin ejercer ningún tipo de estiramiento a la película.

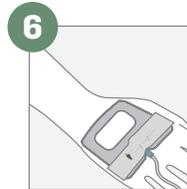

6 Desprenda la etiqueta de información del paciente y ajústela sobre el borde del apósito. Marque el apósito con fecha de colocación.

Retiro


Para realizar el retiro de un apósito, como recomendación opcional puede aplicar **Spray Removedor de Adhesivo** i.v. notice.



7 Aplique el Spray Removedor de Adhesivo i.v. notice sobre los bordes del apósito, espere unos segundos y retire suavemente el adhesivo; repita si es necesario.



9 Después del retiro, hacer siempre registro de valoración y estado de la piel.

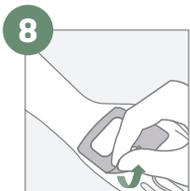


8 Para el retiro del apósito, se recomienda retirar en dirección al vello del paciente de manera suave.



10 Si se desea retirar toda la línea intravenosa, es necesario retirar y desechar el yelco.

Cinta Médica Adhesiva

La **Cinta Médica Adhesiva** está diseñada para la fijación segura de vendajes, sondas, tubos, cánulas, entre otros instrumentos médicos. Ofrece una excelente adherencia prolongada, y ofrece una barrera de protección contra posible contaminación. Es flexible, transpirable y permeable, lo que la hace cómoda y adecuada para pieles sensibles.

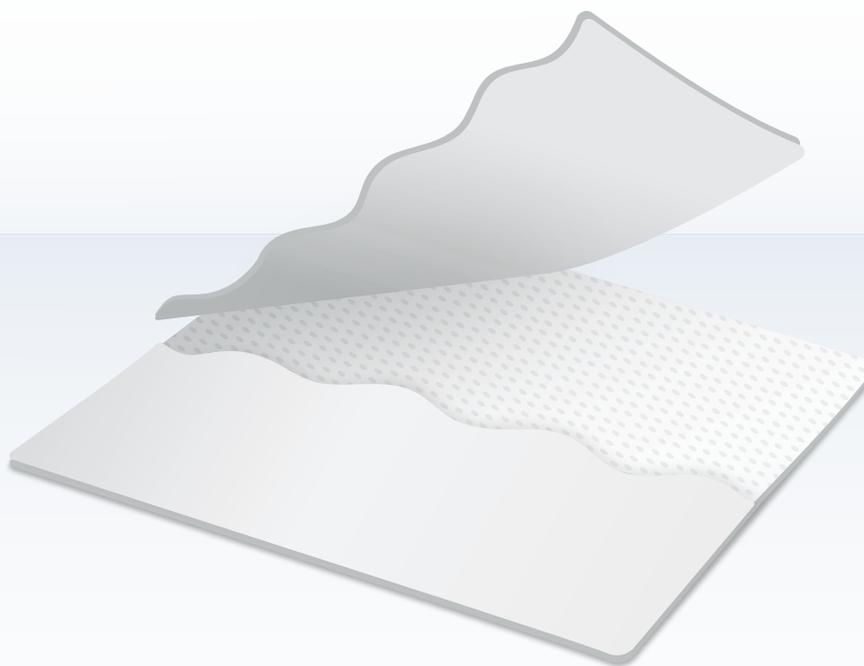

Nuestras Referencias



Sin Apósito
10cm x 10m



Sin Apósito
15cm x 10m



Transparente
10cm x 10m

Cinta Médica Adhesiva Sin Apósito

Las **Cintas Médicas** de Diagnostics M&H Care son un aliado en los procesos que requieran fijación segura de dispositivos durante cualquier tipo de procedimiento ambulatorio y de curación de los pacientes.

Es ideal para ser utilizada en cualquier parte del cuerpo gracias a su poder de adaptabilidad y flexibilidad, además de tener una gran cobertura por su elasticidad.



Información del producto

Código Interno	Descripción	Unds x Caja	Unds x Máster
MH5016	Cinta Médica Adhesiva 10cm x 10m, sin apósito	1	80
MH5022	Cinta Médica Adhesiva 15cm x 10m, sin apósito	1	40

Beneficios

- Compatible con pieles sensibles.
- Proporciona una fijación confiable.
- Gran flexibilidad y adaptable a diversos usos.

Cinta Médica Adhesiva Transparente

La **Cinta Médica Transparente** Diagnostics M&H Care es una excelente opción para la fijación de diferentes dispositivos médicos. Actúa como barrera adhesiva, facilitando no solo la adherencia sino también la visibilidad e inspección durante el proceso de fijación y/o el monitoreo de heridas.



Información del producto

Código Interno	Descripción	Unds x Caja	Unds x Máster
MH5023	Cinta Médica Adhesiva 10cm x 10m, transparente	1	80

Beneficios

- Amplia flexibilidad.
- Apto para pieles sensibles.
- Adaptable al tamaño necesario.
- Asegura el proceso de fijación y adherencia.

Tabla de Referencias

Código Interno	Descripción	Unds x Caja	Unds x Máster
Apósitos			
IVN1001	Apósito i.v. premium Kids, 4.4cm x 4.4cm	50	1.000
IVN1002	Apósito i.v. premium, 6cm x 7cm	50	1.000
IVN1003	Apósito i.v. premium, 8cm x 10cm	50	1.000
IVN1004	Apósito film premium, 10cm x 12cm	100	2.000
IVN1005	Apósito film premium, 6cm x 7cm	100	2.000
IVN1006	Apósito film premium, 4cm x 6cm	100	2.000
IVN1007	Apósito i.v.premium pad, 6cm x 7cm	50	1.000
IVN1008	Apósito i.v.premium pad, 6cm x 10cm	50	1.000
IVN1009	Apósito i.v.premium pad, 9cm x 10cm	50	1.000
Removedor de Adhesivo en Spray			
IVN1010	Spray Removedor Adhesivo, 25mL	1	100
IVN1011	Spray Removedor Adhesivo, 50mL	1	100
Protector Cutáneo			
IVN1012	Protector Cutáneo	30	300
Cinta Médica Adhesiva			
MH5016	Cinta Médica Adhesiva 10cm x 10m, sin apósito	1	80
MH5022	Cinta Médica Adhesiva 15cm x 10m, sin apósito	1	40
MH5023	Cinta Médica Adhesiva 10cm x 10m, transparente	1	80

Otros tamaños y referencias podrían estar disponibles, para más información; contacte a su ejecutivo de venta **Norstray & Nuart**.

i.v.notice

DIAGNOSTICS

M&H CARE | MEDICAL AND HOSPITAL CARE

 Norstray & Nuart brands

Colombia

*Tv. 93 # 51 - 98, Bodega 73A,
Parque Empresarial Puerta Del Sol,
Bogotá, Colombia.*

*Zona Franca Zofia,
Manzana 7, Lot. 37, Bodega 1,
Galapa, Colombia.*

www.norstraynuart.com